


Simulador adulto para acesso venoso femoral guiado por ultra-sons

Nº DE PRODUTO: 4300

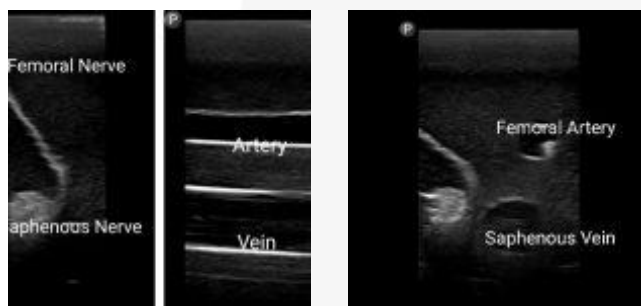

DESCRIÇÃO:

Oferece a oportunidade de aceder a vasos em ambas as extremidades, duplicando o número de pontos de acesso. Desenvolver e praticar competências de imagiologia por ultra-sons, incluindo a utilização dos controlos do sistema de ultra-sons e a colocação e movimentação do transdutor. Aprenda a reconhecer a anatomia arterial e venosa e a identificar a trombose venosa profunda (TVP). Para procedimentos de anestesia regional, pratique a orientação do nervo femoral e a injeção anestésica simulada.

HABILIDADES:

Está disponível formação em anestesia de bloqueio do nervo femoral, incluindo:

- Técnicas de operação por ultrassom

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Identificação neurovascular
- Posicionamento da punção
- Anestesia de bloqueio local

Pode ser ministrada formação sobre punção vascular femoral e cateterização, incluindo:

- Técnicas de operação por ultrassom
- Identificação neurovascular
- Posicionamento da punção
- Punção vascular
- Colocação de fio-guia
- Colocação do cateter
- Fixação do cateter

CARACTERÍSTICAS:

- Estruturas anatómicas precisas dos vasos sanguíneos e nervos femorais:

- Aorta
- Veia cava inferior
- Artéria ilíaca comum
- Veia ilíaca comum
- Artéria ilíaca interna
- Veia ilíaca interna
- Artéria femoral
- Veia femoral
- Veia safena magna
- Nervo femoral
- Nervo da fáscia ilíaca
- ligamentos ilíaco e inguinal
- e outras estruturas vasculares

- Para simular as características dos vasos sanguíneos reais, as veias que não estão cheias podem ser achatadas com a sonda, as artérias que têm pulsatilidade não podem ser achatadas com a sonda, as artérias no modelo são cheias com sangue vermelho simulado e as veias são cheias com sangue azul simulado

- Após uma punção bem sucedida, é possível observar o retorno do sangue
- Estão disponíveis marcadores de superfície, como a sínfise púbica
- O tecido Simulex tem propriedades de auto-regeneração, permitindo efetuar mais de 1000 punções quando utilizado com uma agulha de calibre 18-21
- Podem ser injetados anestésicos simulados realistas e observada a difusão dos anestésicos

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



- Uma punção bem sucedida pode mostrar o retorno do sangue
- Simulação da pulsação arterial com a bomba manual

INCLUI:

- 1 Simulador de membros inferiores para adultos
- 1 Base de apoio

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>